

SLEEPIZ ONE CONNECT

Sleepiz One Connect ist für die Überwachung von physiologischen Parametern, bei Erwachsenen, in Ruhe oder während des Schlafs, in klinischer oder häuslicher Umgebung, bestimmt.

Beste Ergebnisse werden erzielt, wenn Sie der Anleitung Schritt für Schritt folgen.

Ihr Partner kann im selben Bett schlafen. Sie müssen jedoch näher am Sleepiz-Gerät liegen. Sleepiz wünscht eine gute Nacht!



Das finden Sie in der Verpackung:

Stativ



Sleepiz One



SpO2-Sensor



Sleepiz One Ladegerät



Tablet mit Ladegerät



- Verwenden Sie Sleepiz One nicht mit aktiven elektronischen Implantaten (z. B. Herzschrittmachern).
- Schalten Sie das Licht ein, bevor Sie das Bett verlassen, um nicht über Sleepiz One zu stolpern.
- Verwenden Sie Sleepiz One nicht in der Nähe von anderen lebenserhaltenden Geräten, da dessen elektromagnetisches Feld die Funktion anderer Geräte beeinträchtigen kann.
- Dieses Dokument ist nur eine Montageanleitung. Bitte lesen Sie die ausführlich Anleitung vor der Verwendung des Sleepiz One sorgfältig durch.

1



Verbinden Sie das Tablet mit dem Stromnetz im selben Raum in dem Sie schlafen und Sleepiz One verwenden. Das Tablet verbindet alle Geräte und sorgt dafür, dass die Daten übertragen werden.

2



Schalten Sie das Tablet ein, indem Sie die Einschalttaste auf der rechten Seite 3 Sekunden lang drücken. Das Hochfahren und Herstellen einer Internetverbindung kann bis zu drei Minuten dauern. Bitte lassen Sie das Tablet immer am Stromnetz angeschlossen.

3



- a) Schrauben Sie den Stab auf die Platte.
- b) Nutzen Sie das Lineal oben und stellen Sie die Höhe wie in Schritt 4 ein.
- c) Schrauben Sie das Sleepiz-Gerät auf den Stab.

4



Die Unterseite des Geräts ist 5–10 cm oberhalb der Matratze. (Um das Gerät auf der richtigen Höhe zu positionieren, können Sie auch einen Stuhl/Bücher zur Hilfe nehmen.)

5




Nutzen Sie das Lineal oben, um das Sleepiz One 40–50 cm von Ihrem Körper entfernt und unterhalb von Brusthöhe zu positionieren.

6




Stecken Sie das Sleepiz One Ladegerät ein und verbinden Sie es mit dem Stromnetz. Richten Sie den Pfeil auf unterhalb Brusthöhe aus.

7

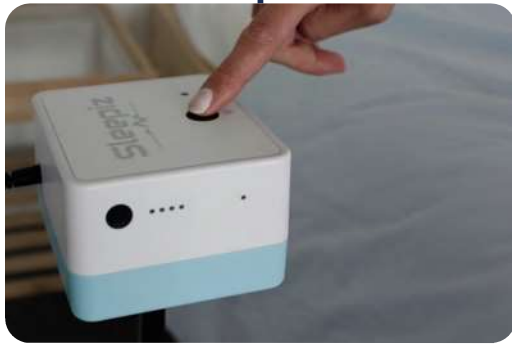

Drücken Sie kurz die Einschalttaste.

8

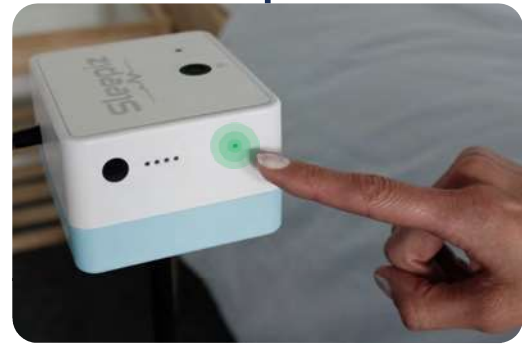

Nach 30 Sekunden schaltet das Licht an der Seite von blau auf grün.

9



Legen Sie den SpO2-Sensor wie auf dem Bild an einer Hand Ihrer Wahl an.

10



Der SpO2-Sensor geht automatisch an, wenn er auf Ihrem Finger ist. Nach ca. 1 Min sehen Sie unter anderem Ihren Puls und Ihre Sauerstoffsättigung.

8-Schritte-Checkliste

1. Ist das Tablet eingeschaltet und mit dem Stromnetz verbunden?
2. Ist das Licht auf der linken Seite des Sleepiz One grün?
3. Zeigt der Pfeil auf dem Sleepiz One in Richtung des unteren Teils Ihrer Brust?
4. Prüfen Sie mit dem Lineal, ob der Sleepiz One 5–10 cm über der Matratze und 40–50 cm von Ihrem unteren Brustkorb entfernt ist.
5. Hat sich der SpO2-Sensor nach dem Anlegen eingeschaltet?
6. Ist das Wolken-Symbol auf dem Tablet grün, was bedeutet, dass eine Internetverbindung besteht?
7. Ist das Sleepiz-Gerätesymbol auf dem Tablet grün, was die Verbindung mit dem Tablet anzeigt?
8. Ist das SpO2-Symbol auf dem Tablet grün, wenn Sie den Sensor tragen?



BEI TECHNISCHEN PROBLEMEN

1. Austausch der SpO2-Batterie

Öffnen Sie zum Austauschen der Batterien des SpO2-Sensors das Batteriefach auf der Rückseite. Entnehmen Sie beide Batterien und legen Sie die neuen ein. Achten Sie dabei darauf, dass die «+»- und «-»-Pole der Batterien richtig eingesetzt werden. Nach dem Austausch der Batterien ist es wichtig, dass Sie das Tablet wie in (2) beschrieben neu starten.



2. Neustart des Tablets

Um das Tablet neu zu starten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der rechten Seite. Drücken Sie dann „Power off“ (Ausschalten) auf dem Display, damit das Tablet heruntergefahren wird. Bitte warten Sie 1 Minute, bevor Sie es wieder einschalten, indem Sie die Ein/Aus-Taste erneut drücken. Warten Sie weitere 3 Minuten, in denen das Tablet startet und eine Internetverbindung herstellt, und überprüfen Sie dann erneut, ob alle Symbole grün sind.



3. Das Wolken-Symbol für die Internetverbindung auf dem Tablet ist rot

Wenn das Wolken-Symbol für die Internetverbindung auf dem Tablet rot ist, schalten Sie das Tablet wie unter (2) beschrieben aus. Wenn möglich, positionieren Sie es näher an ein Fenster oder an einen Ort, an dem Sie eine bessere Mobilfunkabdeckung auf Ihrem Smartphone haben.



4. Das Symbol für das Sleepiz-Gerät und für die Internetverbindung (Wolken-Symbol) auf dem Tablet sind beide rot

Wenn das Wolken-Symbol auf dem Tablet rot ist, haben Sie keine Netzabdeckung. Daher kann das Sleepiz-Gerät auch keine Verbindung zum Tablet herstellen. Befolgen Sie die Schritte unter (3), um eine bessere Netzwerkverbindung zu erhalten.

Falls das Problem weiterhin besteht, da möglicherweise ein Netzwerkproblem in Ihrer Region vorliegt – machen Sie sich keine Sorgen. Das Sleepiz-Gerät speichert die Daten intern und synchronisiert die Daten, sobald die Internetverbindung hergestellt wird. So können Sie dennoch mit der Aufzeichnung weitermachen.



5. Der Tablet-Bildschirm bleibt schwarz

Wenn der Bildschirm des Tablets schwarz bleibt, starten Sie das Gerät wie in (2) beschrieben neu.



WEITERE ANWEISUNGEN UND UNTERSTÜTZUNG

6. Das Symbol für das Sleepiz-Gerät auf dem Tablet ist rot

Wenn das Sleepiz One-Symbol auf dem Tablet rot ist, schalten Sie den Sleepiz One bitte aus, indem Sie 1 Sekunde lang die Ein/Aus-Taste auf der Oberseite des Geräts drücken. Das Logo leuchtet vor dem Ausschalten rot. Bitte warten Sie 1 Minute, bevor Sie es wieder einschalten, indem Sie die Ein/Aus-Taste erneut drücken. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie das Tablet neu starten (2).



7. Die Anzeige für das Sleepiz-Gerät ist nicht grün

Wenn die Anzeige für das Sleepiz-Gerät blau leuchtet, warten Sie mindestens zwei Minuten, da das Gerät möglicherweise noch startet. Wenn die Anzeige für das Gerät violett leuchtet, wird eine Aktualisierung durchgeführt. Warten Sie bis zu 10 Minuten, bis sie grün wird. Wenn die Anzeige für das Gerät blau bleibt oder eine rote Anzeige erscheint, drücken Sie 10 Sekunden lang die Ein/Aus-Taste auf der Oberseite. Warten Sie dann 3 Minuten, bevor Sie das Gerät neu starten. Bitte starten Sie auch das Tablet wie in (2) beschrieben neu.



8. Das Symbol für den SpO2-Sensor auf dem Tablet ist rot

Wenn das SpO2-Symbol auf dem Tablet rot ist, starten Sie das Tablet wie in (2) beschrieben neu.



9. Der SpO2-Sensor schaltet sich nicht ein

Wenn sich der SpO2-Sensor nicht automatisch einschaltet, nachdem er auf den Finger gesetzt wurde, ersetzen Sie die Batterien wie in (1) beschrieben. Versuchen Sie es dann erneut. Bitte überprüfen Sie zusätzlich, ob das Kabel des Fingersensors wie in der Abbildung beschrieben korrekt am Display angeschlossen ist.




Wenn die obigen Anweisungen Ihr Problem nicht lösen konnten, finden Sie weitere Anweisungen und Videos online!

Besuchen Sie www.sleepiz.com/support
oder scannen Sie den QR-Code
oder wenden Sie sich an das Support-Team

support@sleepiz.com oder +41 44 586 08 88



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Wenn die obigen Anweisungen Ihr Problem nicht lösen konnten, finden Sie weitere Anweisungen und Videos online!

Besuchen Sie www.sleepiz.com/support oder scannen Sie den QR-Code oder wenden Sie sich an das Support-Team support@sleepiz.com oder +41 44 586 08 88





Sleepiz One Connect





Sleepiz



TOUCHING LIVES WITHOUT TOUCHING

HOTLINE: +41 44 586 08 88

HORNBACHSTRASSE 23

8008 ZÜRICH

SWITZERLAND

WWW.SLEEPIZ.COM

IFUS-21-002 Rev A

06.10.2021