

SLEEPIZ ONE+ CONNECT

Sleepiz One+ Connect ist für Schlafapnoe-Screenings und die Überwachung der Atemfrequenz, der Pulsfrequenz und der Sauerstoffsättigung des Blutes bei Erwachsenen in Ruhe oder während des Schlafes bestimmt. Sleepiz One+ Connect kann von medizinischem Fachpersonal in einer klinischen Umgebung oder von Personen oder ihrem Pflegepersonal in einer häuslichen Umgebung verwendet werden.

Bitte befolgen Sie die Anweisungen Schritt für Schritt.

Wenn Sie mit einem Partner schlafen, platzieren Sie das Sleepiz One+ bitte neben Ihrer Seite des Bettes.

Sleepiz wünscht Ihnen eine gute Nacht!



Das finden Sie in der Verpackung:

Sleepiz One+



Tablet mit Ladegerät



Stativ




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




Sleepiz One+ Ladegerät



SpO2-Sensor



-  Verwenden Sie Sleepiz One+ nicht mit aktiven elektronischen Implantaten (z. B. Herzschrittmachern)
-  Verwenden Sie Sleepiz One+ nicht in der Nähe von lebenserhaltenden Geräten, da dessen elektromagnetisches Feld die Funktion dieser Geräte beeinträchtigen kann.
-  Der Mindestabstand zwischen Sleepiz One+ und dem menschlichen Körper beträgt 6,5 cm
-  Sleepiz One+ ist nicht für die Verwendung als Vitalparameter-Monitor in Situationen vorgesehen, in denen die Schwankungen der gemessenen Parameter zu einer unmittelbaren Gefahr für den Patienten führen könnten.
-  Schalten Sie das Licht ein, bevor Sie das Bett verlassen, um nicht über Sleepiz One+ zu stolpern
-  Dieses Dokument ist nur eine Montageanleitung. Bitte lesen Sie die ausführliche Anleitung des Sleepiz One+ und des SpO2-Sensors vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

1



Schließen Sie das Tablet an das Stromnetz in Ihrem Schlafzimmer an (d. h. im selben Raum, in dem Sie Sleepiz One+ verwenden). Das Tablet verbindet alle Geräte und sorgt dafür, dass die Daten übertragen werden.

2




Schalten Sie das Tablet ein, indem Sie die Einschalttaste auf der rechten Seite **3 Sekunden** lang drücken. Das Hochfahren und Herstellen einer Internetverbindung kann bis zu **3 Minuten** dauern. Bitte lassen Sie das Tablet immer am Stromnetz angeschlossen.

3



- a) Schrauben Sie den Stab auf die Platte.
- b) Nutzen Sie das Lineal oben und stellen Sie die Höhe wie in Schritt 4 ein.
- c) Schrauben Sie das Sleepiz-Gerät auf den Stab.

4

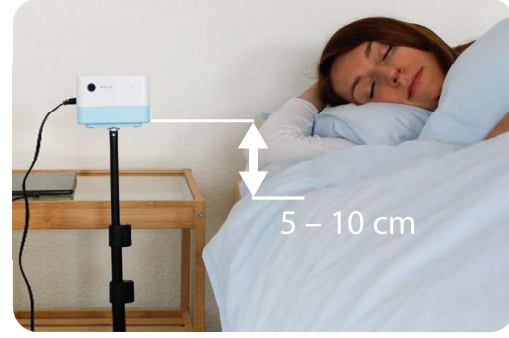

Die Unterseite des Sleepiz One+ sollte **5 – 10 cm** oberhalb der Matratze sein. (Um das Gerät auf der richtigen Höhe zu positionieren, können Sie auch einen Stuhl/Bücher zur Hilfe nehmen.)

5



Nutzen Sie das Lineal oben, um das Sleepiz One+ **40 – 50 cm** von Ihrem Körper entfernt und unterhalb Ihrer Brusthöhe zu positionieren.

6




Stecken Sie das Sleepiz One+ Ladegerät ein und verbinden Sie es mit dem Stromnetz. Richten Sie den **Pfeil** auf unterhalb Ihrer Brusthöhe aus.

7



Drücken Sie kurz die Einschalttaste. Die Kontrollleuchte auf der linken Seite des Sleepiz One+ leuchtet **BLAU** auf.

8

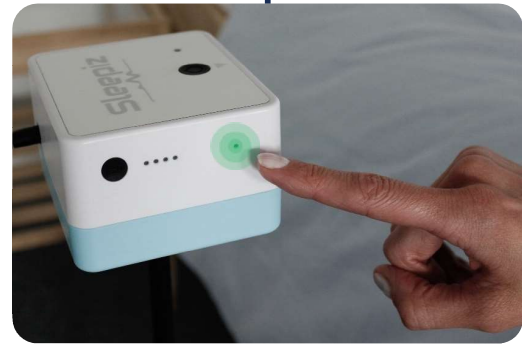

Nach **30 Sekunden** schaltet die Kontrollleuchte an der Seite von blau auf **GRÜN**.

9



Legen Sie den SpO2-Sensor an Ihrem Handgelenk und einem Finger, an dem der Ringensensor fest, aber bequem sitzt, an. Schalten Sie den SpO2-Sensor ein, indem Sie den Knopf an der Seite für **2 Sekunden** drücken.

10



Überprüfen Sie den Batteriestatus auf dem Display und laden Sie den SpO2-Sensor bei Bedarf auf (siehe (8) auf den nächsten Seiten). Nach etwa einer Minute sehen Sie Ihre Pulsfrequenz und Sauerstoffsättigung.

8-Schritte-Checkliste!

1. Ist das Tablet eingeschaltet und mit dem Stromnetz verbunden?
2. Ist das Sleepiz One+ mit dem Stromnetz verbunden und leuchtet die Kontrollleuchte auf der linken Seite **GRÜN**?
3. Zeigt der Pfeil auf dem Sleepiz One+ in Richtung des unteren Teils Ihrer Brust?
4. Prüfen Sie mit dem Lineal, ob das Sleepiz One+ **5–10 cm über der Matratze und 40–50 cm von Ihrem unteren Brustkorb entfernt** ist.
5. Ist der SpO2-Sensor eingeschaltet?
6. Ist das Wolken-Symbol auf dem Tablet **GRÜN**, was bedeutet, dass eine Internetverbindung besteht?
7. Ist das Sleepiz-Gerätesymbol auf dem Tablet **GRÜN**, was die Verbindung mit dem Tablet anzeigt?
8. Ist das SpO2-Sensor-Symbol auf dem Tablet **GRÜN**, wenn Sie den Sensor tragen?



BEI TECHNISCHEN PROBLEMEN

1. Das Wolken-Symbol auf dem Tablet ist **ROT**

Wenn das Wolkensymbol auf dem Tablet **ROT** ist, starten Sie das Tablet bitte neu, wie unter (7) auf der nächsten Seite beschrieben. Wenn möglich, legen Sie es näher an ein Fenster oder an einen Ort, an dem Sie eine bessere Mobilfunkabdeckung auf Ihrem Smartphone haben.

Falls das Problem weiterhin besteht, kann es sein, dass Sie ein Netzproblem in Ihrer Gegend haben. Keine Sorge, das Sleepiz-Gerät speichert die Daten intern und synchronisiert sie, sobald die Internetverbindung hergestellt ist. Sie können also weiterhin mit der Aufzeichnung fortfahren.



2. Das Sleepiz One+-Symbol auf dem Tablet ist **ROT**

Wenn das Sleepiz One+-Symbol auf dem Tablet **5 Minuten** nach dem Einschalten weiterhin **ROT** ist, starten Sie es bitte erneut. Bitte schalten Sie das Sleepiz One+ zuerst aus, indem Sie die Einschalttaste auf der Oberseite des Geräts **1 Sekunde** lang drücken. Das Logo leuchtet vor dem Ausschalten orange auf. Bitte warten Sie **1 Minute**, bevor Sie das Gerät wieder einschalten, indem Sie die Einschalttaste erneut drücken, wie unter (6) auf der nächsten Seite beschrieben. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie das Tablet neu starten, wie in (7) auf der nächsten Seite beschrieben.



3. Das SpO2-Sensor-Symbol auf dem Tablet ist **ROT**

Wenn das Symbol des SpO2-Sensors auf dem Tablet **ROT** ist, überprüfen Sie bitte, ob der SpO2-Sensor eingeschaltet und vollständig geladen ist. Um den Batteriestatus zu sehen, drücken Sie **kurz** auf die Taste des SpO2-Sensors. Falls erforderlich, laden Sie den Sensor wie unter (8) auf der nächsten Seite beschrieben auf und/oder schalten Sie ihn ein, wie in Schritt 10 des Einrichtungsvorgangs auf der vorherigen Seite beschrieben.

Wenn der Sensor geladen und in Betrieb ist, das Symbol aber immer noch rot ist, warten Sie bitte **2 Minuten** und starten Sie das Tablet neu, wie unter (7) auf der nächsten Seite beschrieben.



4. Der Tablet-Bildschirm bleibt **SCHWARZ** oder **WEISS**

Wenn der Bildschirm des Tablets **SCHWARZ** oder **WEISS** bleibt, starten Sie das Gerät wie in (7) beschrieben neu.




5. Die Kontrollleuchte des Sleepiz One+ ist nicht grün

Wenn die Kontrollleuchte **BLAU** leuchtet, warten Sie mindestens **2 Minuten**, da das Gerät möglicherweise noch startet.

Wenn die Kontrollleuchte **VIOLETT** leuchtet, wird eine Aktualisierung durchgeführt. Warten Sie bis zu **10 Minuten**, bis sie grün wird.

Wenn die Kontrollleuchte **BLAU** oder **ROT** leuchtet, drücken Sie **10 Sekunden** lang die Ein/Aus-Taste auf der Oberseite.

Warten Sie dann **3 Minuten**, bevor Sie das Gerät neu starten, wie unter (6) auf der nächsten Seite beschrieben. Bitte starten Sie auch das Tablet neu, wie in (7) auf der nächsten Seite beschrieben.

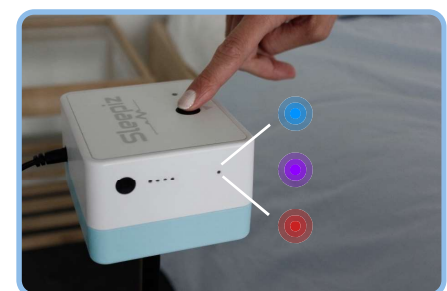

WEITERE ANWEISUNGEN UND UNTERSTÜTZUNG

6. Neustart des Sleepiz One+

Um das Sleepiz One+ neu zu starten, schalten Sie es bitte zuerst aus, indem Sie die Einschalttaste auf der Oberseite des Geräts **1 Sekunde** lang drücken. Das Logo leuchtet vor dem Ausschalten orange auf. Bitte warten Sie **1 Minute**, bevor Sie das Gerät durch erneutes Drücken der Einschalttaste wieder einschalten. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie das Tablet wie in (7) unten beschrieben neu starten.



7. Neustart des Tablets

Um das Tablet neu zu starten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der rechten Seite für **3 Sekunden**. Drücken Sie dann „**Power off**“ (Ausschalten) auf dem Display, damit das Tablet heruntergefahren wird.

Bitte warten Sie **1 Minute**, bevor Sie es wieder einschalten, indem Sie die Ein/Aus-Taste erneut drücken. Warten Sie **3 Minuten**, in denen das Tablet startet und eine Internetverbindung herstellt, und überprüfen Sie dann erneut, ob alle Symbole **GRÜN** sind.



8. Aufladen des SpO2-Sensors

Wenn sich der SpO2-Sensor beim Drücken der Taste nicht einschaltet oder die Batterieanzeige einen niedrigen Batteriestand anzeigt, laden Sie den SpO2-Sensor bitte mit dem **WEISSEN** Ladekabel und dem Netzadapter des Tablet-Ladegeräts auf.

Die Ladedauer beträgt etwa **3 Stunden** für eine vollständige Ladung. **1 Stunde** Ladezeit ist ausreichend für eine vollständige Nachtmessung. Achten Sie darauf, dass Sie das Ladekabel nach dem Aufladen mit dem Ring-Sensor-Kabel austauschen. Achten Sie auch darauf das Ring-Sensor-Kabel wieder richtig an das Sensorgerät anzuschließen!



9. Beenden der Aufnahme

Um die Aufzeichnung zu beenden, schalten Sie das Sleepiz One+ aus, indem Sie die Einschalttaste auf der Oberseite des Geräts **1 Sekunde** lang drücken. Das Logo leuchtet orange auf, bevor es sich ausschaltet.


Um das Tablet auszuschalten, drücken Sie bitte die Einschalttaste auf der rechten Seite für **3 Sekunden**. Drücken Sie dann auf "**Power off**" (Ausschalten) auf dem Display, um das Tablet auszuschalten.



Wenn diese Anleitung Ihr Problem nicht gelöst hat, finden Sie weitere Anleitungen und Videos im Internet!

Besuchen Sie www.sleepiz.com/support
oder scannen Sie den QR-Code
oder kontaktieren Sie das Support-Team

support@sleepiz.com oder +41 44 586 08 88

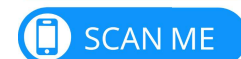

Wenn diese Anleitung Ihr Problem nicht gelöst hat, finden Sie weitere Anleitungen und Videos im Internet!

Besuchen Sie www.sleepiz.com/support oder scannen Sie den QR-Code oder kontaktieren Sie das Support-Team

support@sleepiz.com oder +41 44 586 08 88





Sleepiz One+ Connect





Sleepiz



TOUCHING LIVES WITHOUT TOUCHING

 **SLEEPIZ AG**
HORNBAACHSTRASSE 23
8008 ZÜRICH
SWITZERLAND

WWW.SLEEPIZ.COM

HOTLINE: +41 44 586 08 88

IFUS-22-001 Rev A
2022-03-23